




Klipsisetti




Aseta laukaisin kanava aukkoon

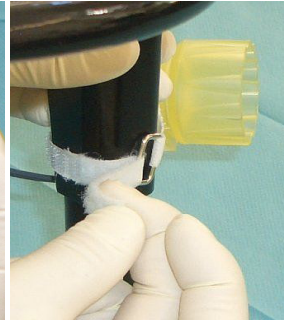

Kiinnitä tarranauhalla skoopin runkoon




Työnnä tartuntapihti kanavan läpi

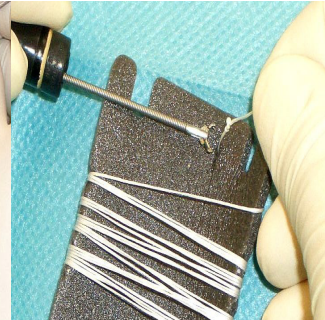


Tartu pihdillä laukaisulankaan

Ovesco käyttö- ohje UpViser

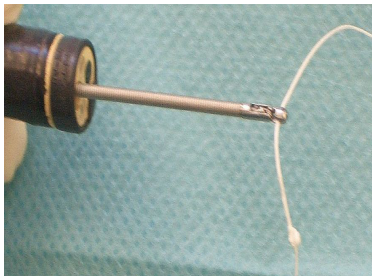


Vedä lankakanavan läpi

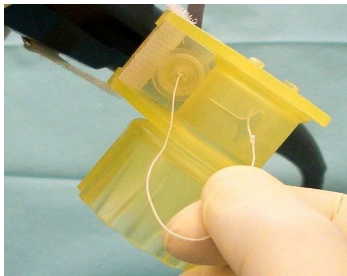


Pujota lanka hahloon




Vedä hahlon pohjaan asti

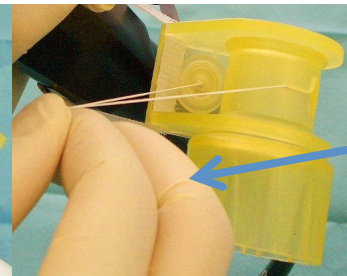

Tiukkaa

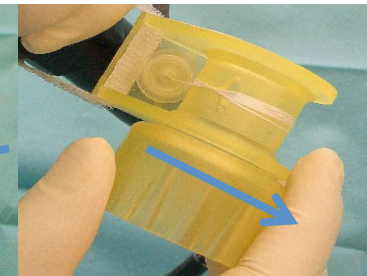

Pyöritä rullalle – ei liian kireälle

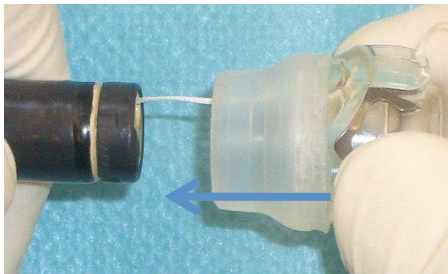


Työnnä tutti skoopin päähän




Tarkista tiukkuus ja suoruus



Tarkista, ettei lanka mene näkökentän yli

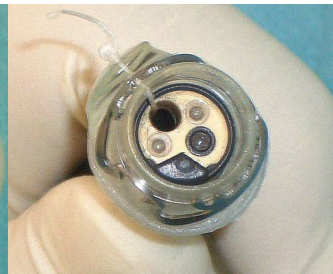

Oikein

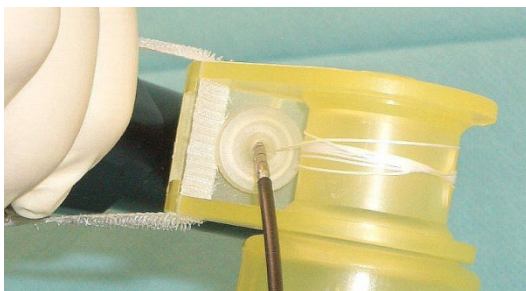

Vie pihti kanavan läpi ja vedä kudotuttiin, käytä imua apuna

Laukaise nopealla liikkeellä