

AMS 700 MS™ -sarjan Pumpattava penisproteesi

Käyttöopas

AMS 700 MS –sarjan pumpattava penisproteesi.....	1
AMS 700 MS –sarjan pumpattavan penisproteesin käyttö.....	2-3
Mitä toimenpiteen jälkeen on odotettavissa?.....	4
Milloin on syytä ottaa yhteyttä hoidosta vastaavaan urologiin?.....	5

AMS 700 MS -sarjan pumpattava penisproteesi


AMS 700 MS-sarjan pumpattava penisproteesi on nestetäyttöinen laiteimplantti, joka asennetaan täysin kehon sisään, niin että sitä ei voi nähdä.

Proteesi muodostuu neljästä osasta, jotka yhdistyvät toisiinsa letkuilla (kuva 1): säiliö, kaksi sylinteriä (keinopaisuvaiset) ja pumppu.


Säiliö asennetaan alavatsaan lihasten alle ja täytetään steriilillä keittosuolaliuoksella. Säiliöstä liuos pumpataan sylintereihin, mutta vasta silloin, kun laitetta aletaan käyttää.

Sylinterit, joita on kaksi, asennetaan vierekkäin peniksen varteen.

Pumppu muodostuu pehmeästä ja pyöreästä pumppauspäästä ja suorakulmaisesta tyhjennyspainikeosasta, ja se asennetaan kivespussiin. Pumpun avulla (kuva 2) sylinterit saadaan täyttymään (neste siirtyy säiliöstä sylintereihin) ja tyhjentymään. Varsinainen pumppauspää on muodoltaan pyöreä ja pumpussa alimpana. Tyhjennyspainike sijaitsee sen yllä olevassa kovassa suorakulmaisessa osassa.

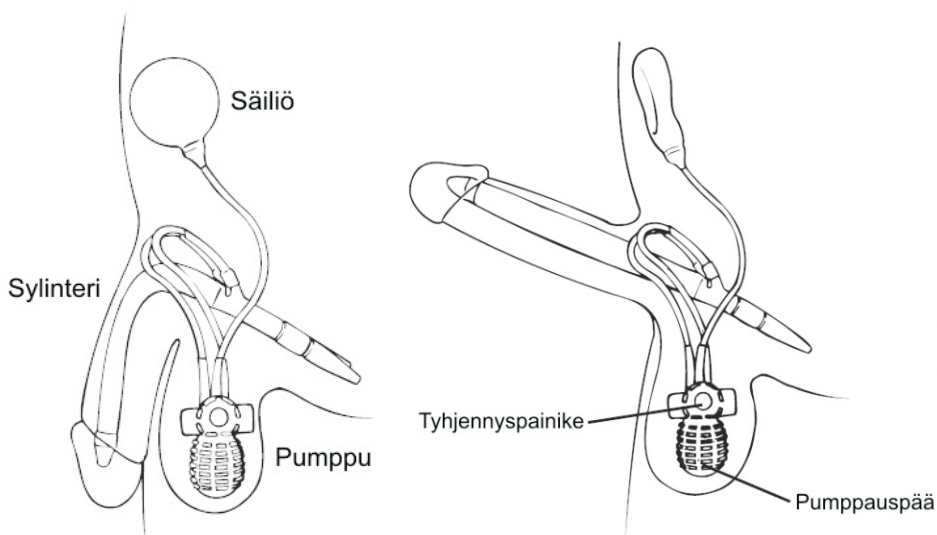

kuva 1

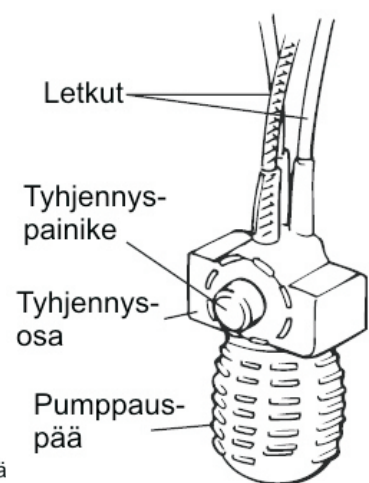

kuva 2


AMS 700 MS- pumpattavan penisproteesin käyttö

Proteesin täyttö

Kun puristat pumpppua sen pehmeästä pyöreästä pumppauspäästä, neste kulkeutuu säiliöstä pumpun kautta sylintereihin. Sylintereitten täittyminen nesteellä saa peniksen jäykistymään.

1. Etsi pumpppu tunnustelemalla sormin kivespussia.
2. Ota toisella kädellä kiinni suorakulmaisen tyhjennysosan yläpuolelta olevista letkuista, jotta pumpppu pysyy paikallaan.
3. Paikanna toisen käden peukalolla ja etusormella pumpun pyöreä pumppauspää.
4. Purista pumppauspäästä aluksi **nopeasti ja lujasti** ja päästä sitten irti, jotta pumpppu alkaa toimia (kuva 3). Tämän jälkeen voit puristaa pumppauspäästä hitaammin. Aina kun päästät irti, pumppauspää täyttyy uudelleen nesteellä. Jatka pumppaamista (purista, päästä irti), kunnes sylinterit täyttyvät nesteellä ja jäykistyvät. Täydellisen erektion saavuttamiseksi saatat tarvita 10 - 25 pumpun painallusta.

Huom: Älä purista tyhjennyspainiketta samalla, kun pumppaat.

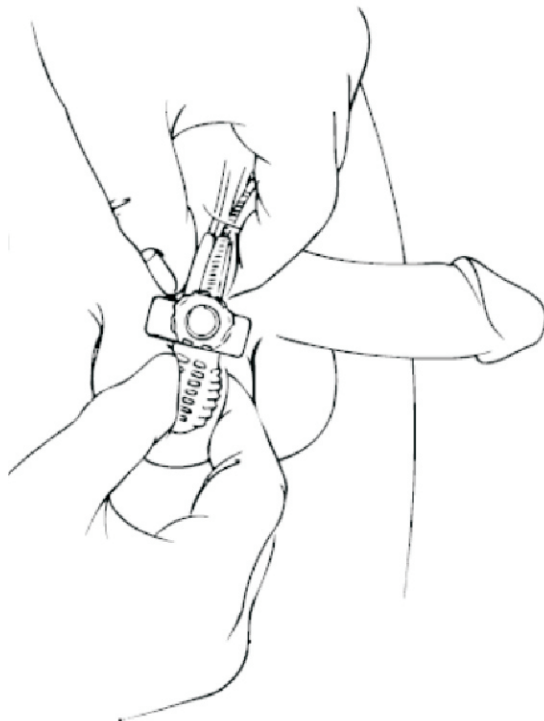

kuva 3

AMS 700 MS - pumpattavan penisproteesin käyttö

Proteesin tyhjentäminen

1. Etsi pumppu tunnustelemalla sormin kivespussia.
2. Ota toisella kädellä kiinni suorakulmaisen tyhjennysosan yläpuolelta olevista letkuista, jotta pumppu pysyy paikallaan.
3. Paikanna kova suorakulmion muotoinen alue pumpun alapuolella.
4. Laita toisen käden peukalo ja etusormi suorakulmion päihin. Tämä on tyhjennysalue.
5. Purista tukevalla jatkuvalla otteella noin 4 sekuntia tyhjennysalueesta kunnes peniksesi on taas pehmeä. Peniksen puristaminen samalla kun painat tyhjennysalueesta saattaa auttaa nesteen palautumista säiliöön nopeammin.



kuva 4

Mitä toimenpiteen jälkeen on odotettavissa?

Tiukkojen alusvaatteiden käyttöä tulee välttää sairaalasta pääsyn jälkeen myös kotona. Tällä pyritään estämään peniksen mahdollinen käyristyminen paranemisvaiheen aikana. Myös virtsaamisen jälkeen on tärkeää, että penis kiinnitetään laastariteipillä vatsaan samaan asentoon (suoraan), jossa se oli ennen teippien irrottamista.

Toimenpidekohdissa saattaa tuntua kipua ja arkuutta jonkin aikaa leikkauksen jälkeen ja ensimmäisen kerran, kun proteesia käytetään. Useimmiten kipu häviää leikkauksen jälkeen muutamassa viikossa. On kuitenkin tapauksia, joissa kipu on ollut jatkuvaa (kroonista).

Toipumisaika vaihtelee yksilöllisesti. Voit palata työhön ja päivittäisiin toimiisi urologin harkinnan tai ohjeiden mukaisesti.

Lääkäri kertoo sinulle, milloin proteesin käytön voi aloittaa. Useimmat lääkärit suosittelevat 4 – 6 viikon toipumisaikaa ennen yhdyntöjen aloittamista. Tällöin haavat ehtivät parantua ja elimistö sopeutua proteesiin. Tänä aikana on hyvä käydä lääkärin vastaanotolla, missä varmistetaan, että paraneminen sujuu odotetusti. Lääkäri päättää myös toimenpiteen jälkeisistä lisä- tai seurantakäynneistä.

Kun saat lääkäriltä luvan käyttää laitetta, noudata sivuilla 3 & 4 annettuja käyttöohjeita.

Paranemisen aikana ja sen jälkeen on tärkeää välttää lantion ja alavatsan alueelle kohdistuvia vammoja. Muistathan aina, että sinulla on kirurgisesti asennettu implantti ja valitset viisaasti, sen mihin ryhdyt. Esimerkkeinä vammoista mainittakoon mm. auto-onnettomuuksien yhteydessä syntyvät turvavyövammat sekä vahingot, joita syntyy, kun kontaktiurheilulajeissa taklataan, tai liukastuu ja kaatuu jäällä. Vamma voi vahingoittaa proteesia tai sitä ympäröiviä kudoksia. Myös pistoksina annettava hoito saattaa vahingoittaa proteesia.


Lääkäri voi määrätä sinulle myös antibiootteja ennen ja jälkeen kirurgisia toimenpiteitä tulehdusten ennaltaehkäisemiseksi.

Milloin on syytä ottaa yhteyttä hoidosta vastaavaan urologiin?

Lääketieteellisten toimenpiteiden yhteydessä on aina mahdollista, että toimenpiteen jälkeen potilaalle ilmaantuu oireita ja kliinisiä merkkejä. Niitä voivat olla:

- x Epätavallinen tai pitkittynyt kipu
- x Punoitus tai ihottuma lähellä haavaa tai kivespussia
- x Turvotus lähellä haavaa, kivespussia tai penistä
- x Haavasta tai peniksen päästä tulee märkäeritettä
- x Nokkosihottuma
- x Kuume
- x Mikä hyvänsä ongelma, joka liittyy virtsaukseen

Ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi, jos sinulla ilmenee jokin edellä mainituista oireista.

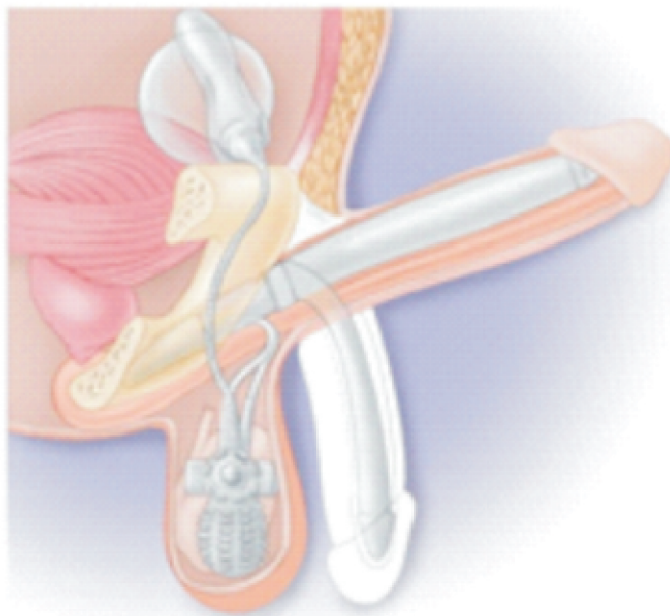



UpViser Oy
Leinikkitie 20 B
FI-01350 Vantaa
Tel. +358 10 8354 500
Fax +358 10 8354 501
www.upviser.fi
info@upviser.fi